

Mikrobac® Tissues



Lingettes de désinfection sans alcool, dans un emballage pratique, pour la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool et dispositifs médicaux fragiles.

Mikrobac® Tissues

Propriétés

- lingettes de désinfection prêtes à l'emploi,
- effet rapide,
- pratique,
- convient également aux matériaux sensibles à l'alcool,
- nettoyage et désinfection en un seul geste,
- bonne imprégnation,
- sans alcool, aldéhyde, colorant ni parfum,
- peut être utilisé en alternance avec des produits contenant d'autres substances actives (par exemple, les aldéhydes ou les amines) sans aucun problème,
- distribution facile et sûre de lingettes à l'unité grâce à son emballage refermable et à un système de pliage pratique,
- libération optimale des principes actifs au cours de la désinfection.

Composition

Principes actifs de la solution :

Chlorure d'alkyl(C12-C18)benzyltriméthylammonium :

4 mg / g.

Chlorure de didécyltriméthylammonium : 4 mg/g.

Microbiologie

- bactéricide,
- levuricide,
- virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC),
- MNV,
- rota- et polyomavirus.

Domaines d'application

Les lingettes Mikrobac ® Tissues sont adaptées au nettoyage/désinfection simple :

Des dispositifs médicaux notamment :

- parties sensible à l'alcool, ne pouvant être immergées dans des liquides, tels que les têtes ultrasoniques de sondes pour les examens abdominaux.*

De tous les types d'appareils médicaux de nature délicate et les surfaces, tels que:

- les sols des hôpitaux, des cabinets médicaux et dentaires, des ambulances,
- des laboratoires médicaux, maisons de retraite et établissements de soins infirmiers, etc.
- petits objets et surfaces telles que les sièges de toilette, poignées de porte, cadres de lit et bureaux.

* A noter que pour la désinfection des dispositifs médicaux semi-critiques (par exemple, les têtes ultrasoniques de sondes pour les examens vaginaux) dans le cas où aucune stérilisation ne s'ensuit. « Eléments semi-invasifs requérant au minimum une désinfection de haut niveau à l'aide de désinfectants chimiques. »¹

¹ William A. Rutala, Ph.D., M.P.H. David J. Weber, M.D., M.P.H. and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC): Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf. 28.11.2012

Instructions d'utilisation

Essuyez soigneusement les surfaces avec les lingettes Mikrobac ® Tissues, en recouvrant bien les surfaces, pour une désinfection optimale.

Si nécessaire, essuyez la surface avec un chiffon jetable après l'expiration du temps de contact (par exemple, si des personnes sont susceptibles d'entrer en contact direct avec la surface).

- désinfection pour l'entretien des surfaces dures : concentré 30 secondes.

Éliminez les lingettes comme il convient après chaque utilisation. Pour enlever les résidus de désinfectant des surfaces sensibles en plastique des dispositifs médicaux, essuyez-les avec un chiffon imbibé d'eau (potable au minimum) après le temps de contact. Veuillez respecter les instructions du fabricant. Nous vous recommandons de porter des gants appropriés lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas utiliser pour nettoyer la peau. Ne doit pas être utilisé pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques. Afin d'éviter que les lingettes ne sèchent, refermez le couvercle de l'emballage après utilisation.

Utilisez les désinfectants avec précaution. Lisez toujours les étiquettes et informations-produits avant usage.

Agréments

- Philips Medical Systems,
- Aloka GmbH,
- BK Medical Medizinische Systeme GmbH.

Normes européennes

Bactéricidie / Fongicidie :

Efficacité selon EN phase 1 / Etape 1	
Bactéricidie (EN 1040)	30 sec.
Levuricide (EN 1275)	30 sec.
Efficacité selon EN phase 2 / Etape 1 (test en suspension), testé dans les conditions de propreté et de saleté.	
Bactéricidie (EN 13727)	
conditions de saleté	30 sec.
Levuricide (EN 13624)	
conditions de saleté	30 sec.

Virucidie :

Efficacité évaluée contre les virus non enveloppés (selon EN 14476)	
MNV (norovirus murin) :	
-conditions de propreté :	4 hrs.
- conditions de saleté :	4 hrs.
Rotavirus	1 min



Mikrobac® Tissues

Autres tests :

Recommandations certifiées d'application pour la désinfection prophylactique par essuyage de l'Association pour l'Hygiène Appliquée (VAH). Basé sur des tests de suspension et des essais pratiques, testés dans des conditions de propreté (c'est-à-dire des surfaces visiblement propre) et dans des conditions de saleté (c'est-à-dire des surfaces visiblement souillées)	
Bactéricidie / Levuricidie	
conditions de saleté	5 min
Désinfection rapide (selon la société allemande pour l'hygiène et la microbiologie : DGMH) ; basé sur des tests de suspension et des essais pratiques, testés dans des conditions de propreté et de saleté	
Bactéricidie / Levuricidie	
conditions de saleté	1 min.
Efficacité contre les virus (Société allemande pour le contrôle des maladies virales : DVV)	
Virucidie contre les virus enveloppés (y compris VHB, VHC, VIH)	30 sec.
Efficacité évaluée contre les virus non enveloppés (DVV)	
Polyomavirus	1 min.
Rotavirus	30 sec.

Industrie agroalimentaire :

Efficacité selon EN phase 2 / Etape 2, tests pratiques, testée dans différentes conditions.	
Bactéricidie (EN 13697)	
Faible contamination (20°C)	1 min.
Forte contamination (20°C)	1 min.
Faible contamination (10°C)	1 min.
Forte contamination (10°C)	5 min.
Faible contamination (4°C)	1 min.
Forte contamination (4°C)	5 min.
Levuricidie (EN 13697)	
Faible contamination (20°C)	1 min.
Forte contamination (20°C)	5 min.
Faible contamination (10°C)	1 min.
Forte contamination (10°C)	5 min.
Faible contamination (4°C)	1 min.
Forte contamination (4°C)	5 min.
Efficacité selon EN phase 2 / Etape 1, tests en suspension, testée dans différentes conditions.	
Bactéricidie (EN 1276)	
Faible et forte contamination (20°C)	1 min.
Faible et forte contamination (10°C)	1 min.
Faible et forte contamination (4°C)	1 min.
Levuricidie (EN 1650)	
Faible et forte contamination (20°C)	1 min.
Faible et forte contamination (10°C)	1 min.
Faible et forte contamination (4°C)	1 min.

Réglementation

- Dispositifs Médical de classe IIa selon la directive européenne 93/42/CEE.
- Produit Biocide TP2 et TP4 selon la directive européenne 98/8/CE.

Données physico-chimiques

Les données suivantes se rapportent à la solution utilisée dans Mikrobac® Tissues :

- Densité (20 °C) : env. 1 g/cm3
- pH (20 °C) : env. 8

Dimensions de la lingette : 180 x 200 mm

Durée de conservation

- Avant ouverture : voir la date de péremption sur l'étiquette
- Après ouverture : 3 mois

Conditionnement

Référence BODE	Référence de commande	Code EAN13	Emballage de	Nb unités / carton
981127	980570	4031678043514	80 lingettes	6

Référence BODE	Référence de commande	Code EAN13	Nb cartons / palette	Nb unités / palette
981127	980570	4031678043514	70	420

Remarque

Remarque : les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests scientifiques et sont communiquées au meilleur de nos connaissances. Des informations plus approfondies, par exemple en ce qui concerne la tolérance des matériaux, ne sont possibles qu'au cas par cas. Nos recommandations ne nous engagent pas et ne sont pas une garantie. Elles n'excluent pas la nécessité pour l'utilisateur de procéder à ses propres tests pour les procédés et les buts envisagés. Sur ce point, nous déclinons toute responsabilité. Celle-ci est régie par nos conditions générales de vente et de livraison.

BODE France SAS
 67730 Châtenois
www.bode-france.fr
Lab. PAUL HARTMANN Sarl
 67607 Sélestat Cedex
www.hartmann.info
 Tél : 03 88 82 43 43
 Fax : 03 88 82 43 99

A company of the
HARTMANN GROUP

